

Produktinformation

Hinweis

Das Face Shield WimPro hat eine Zulassung als Persönliche Schutzausrüstung gem. PSA-Verordnung (EU) 2016/425. EN 166:2001 (teilweise angewandt)



Anwendung

- | Vor Gebrauch beidseitig Schutzfolien abziehen und desinfizieren.
- | Die Länge des Kopfbandes ist durch einen Klettverschluss individuell auf alle Größen einstellbar.
- | Das Visier sollte nicht geknickt oder gefaltet werden.
- | Bei Bedarf PU-Schaumstoff-Stirnpolster vom Folienvisier abziehen und ersetzen (siehe Austauschschaumstoffe).

Warnung

- | Wird nicht unter sterilen Bedingungen hergestellt.
- | Dient ausschließlich als Abwehrschirm vor Tröpfchen bei engem Körperkontakt (face to face).
- | Material, das in Kontakt mit der Haut kommt, kann bei empfindlichen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheit

- | Ersetzt keine anderen Schutzmaßnahmen.
- | Ersetzt keine Atemmaske.
- | Ergänzt lediglich andere erforderliche Schutzmaßnahmen.
- | Ein beschädigtes, geknicktes oder zerkratztes Visier kann die Sicht beeinträchtigen und sollte ggf. nicht mehr verwendet werden.
- | Darf nicht auf warme/heiße Flächen abgelegt bzw. Hitze ausgesetzt werden (Schmelzgefahr).

Wer sich schützt, schützt uns alle.

clever. protection.



Hersteller: Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH
Steinmattenstr. 8, 79423 Heitersheim
www.winterhalder.de