



clever.composites.

Benutzerinformation & Gebrauchsanweisung

Wimmer Face Shield WimPro

1. Einführung, Anwendungsbereich

Das **Wimmer Face Shield WimPro** kurz '**WimPro**' ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend der PSA Verordnung (EU) 2016/425, das bei sachgemäßer Verwendung vor Tröpfchen und Spritzern von Flüssigkeiten schützt. Dies verringert das Risiko einer Tröpfcheninfektion. Aufgrund seines Designs ist ein vollständiger Schutz gegen Viren, Bakterien oder anderen biologischen Agenzien nur in begrenztem Umfang gegeben. **WimPro** kann mit Atemschutzmasken kombiniert werden (nicht steril). **WimPro** ist für Anwendungen im medizinischen Bereich, der Pflege, dem Rettungswesen und anderen von COVID-19 betroffenen Arbeitsgebieten, welche den gleichen Schutzzweck benötigen, zu verwenden.

Die EU-Baumusterbescheinigung (Zertifikat) und die EU-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Webseite www.wimmer-composites.com/datasheets/WimPro

2. Warnungen

WimPro SCHÜTZT NICHT VOR MECHANISCHEN EINWIRKUNGEN!

- Nur als Kit zu verwenden,
- unangemessene Verpackung kann das Schutzniveau verringern; beachten Sie deshalb die Anweisungen gemäß Kapitel 5,
- Werkstoffe, die in Kontakt mit der Haut des Trägers kommen können, könnten bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

Verwenden Sie **WimPro** nicht mehr, wenn es:

- zerkratzt, rissig oder anderweitig beschädigt ist,
- Änderungen in Form und Farbe zeigt,
- Chemikalien, Ölen oder Fetten ausgesetzt war*,
- großer Hitze oder über lange Zeit der Sonne ausgesetzt war*.

* Schäden sind für den Endbenutzer möglicherweise nicht sichtbar.

3. Lieferumfang

- Hochtransparente Sichtscheibe mit
 - elastischem Band mit Klettverschluss,
 - weichem PU-Schaumpolster mit wieder ablösbarem Klebeband,
- wieder ablösbare Klebeetiketten,
- drei Ersatz-PU-Schaumpolster mit wieder ablösbarem Klebeband*,
- Wiederverschließbarer Beutel (nicht steril) mit Kurzanleitung.

* weitere Ergänzungssets verfügbar.

4. Verwendung

Setzen Sie die Sichtscheibe mit dem weichen PU-Schaumpolster mittig auf Ihrer Stirn auf und fixieren Sie das **WimPro** mit dem Klettverschluss am elastischen Band so, dass es sicher, aber nicht zu fest Ihren Kopf umschließt.

Prüfen Sie den angenehmen, aber sicheren Sitz, bevor Sie das Patientenzimmer oder den Pflegebereich betreten. Stellen Sie sicher, dass im Gesichtsbereich keine Haare oder möglicherweise kontaminierte Kleidungsstücke oder andere kontaminierte PSA unter dem **WimPro** sind.

Wenn Sie **WimPro** in Kombination mit anderer PSA nutzen, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen der anderen PSA-Hersteller. Nehmen Sie es vorsichtig ab, bevor Sie das Patientenzimmer oder den Pflegebereich verlassen, vermeiden Sie den Kontakt mit kontaminierten Oberflächen und desinfizieren oder entsorgen Sie **WimPro** oder seine Komponenten ordnungsgemäß. Zur Desinfektion verwenden Sie bitte handelsübliche Handdesinfektionsmittel (siehe z.B. <https://www.gws-gesundheit.de/desinfektionsmittel>)



clever.composites.

5. Lagerung

Für beste Ergebnisse bewahren Sie **WimPro** in dem von **Wimmer** verwendeten wiederverschließbaren Beutel auf. (HINWEIS: Verschiedene andere Verpackungsmaterialien können Weichmacher oder Lösungsmittel enthalten, die die Eigenschaften des **WimPro** beeinträchtigen können.) Lagern Sie das **WimPro** vor Sonnenlicht oder künstlichem UV-Licht geschützt bis zu 3 Jahre in einer sauberen, trockenen Umgebung bei +10°C bis +40°C.

6. Normen und CE-Kennzeichnung

WimPro ist zertifiziert nach EN166:2001 - teilweise angewendet, entsprechend den speziellen Anforderungen zum Schutz vor dem SARS-CoV-2-Virus - mit der Kennzeichnung:

KW 1 3 CE

mit folgenden Bedeutungen

KW	Herstellerkennung (Kunststoffverarbeitung Wimmer GmbH)
1	optische Klasse 1
3	Schutz gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten
CE	CE-Kennzeichnung gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425, Artikel 17 für Kategorie II Produkte.

7. Wichtige Adressen

Hersteller Kunststoffverarbeitung Wimmer GmbH Schmidhamer Str. 24 83278 Traunstein-Wolkersdorf Deutschland Telefon: 08 61/9 89 42-0 Telefax: 08 61/9 89 42-18 info@wimmer-composites.com www.wimmer-composites.com	Benannte Stelle ECS GmbH Hüttfeldstr. 50 73430 Aalen Germany Phone +49 7361 9757396 Fax. +49 7361 5562434 Email: info@ecs-eyesafe.de Web: www.ecs-eyesafe.de
---	---

8. Gefährdungsbeurteilung

Zur Auswahl eines geeigneten Augen- und Gesichtsschutzes muss eine Gefährdungsbeurteilung von gut ausgebildeten Fachleuten durchgeführt werden. Der Augen- und Gesichtsschutz darf niemals in Umgebungen mit einer höheren Gefährdungsbeurteilung verwendet werden als mit der Produktkennzeichnung (Kap. 6) angegeben. Gemäß dieser Gefährdungsbeurteilung muss **WimPro** ggf. mit weiterer PSA, wie einem Overall, einer Atemschutzmaske, einer Korbbrille, Handschuhen usw. kombiniert werden.

9. Erklärung zur REACH-Verordnung

Der Hersteller versichert, dass das hier beschriebene Produkt und dessen Verpackung keine nach Artikel 57 der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 aufzunehmenden Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) gemäß Artikel 33 dieser Verordnung enthalten.

10. Entsorgung

Nach Verwendung ist **WimPro** als "Kontaminiertes, gemischtes Kunststoffprodukte" zu entsorgen.